

Anleitung

Qualitätskontrolle am Element DC

Kontrollmaterial: BioRad Liquid Assayed Multiqual Control
(Art.nr.: 8185)

Vorbereitung:

- Kontrollmaterial BioRad Liquid Assayed Multiqual Control aus dem Gefrierschrank nehmen
- mindestens 20 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen

Durchführung der Qualitätskontrollmessung:

Zur Überprüfung der Geräte- und Reagenzperformance ist die Durchführung von Qualitätskontrollmessungen empfohlen.

- Das jeweilige Qualitätskontrollmaterial wird wie eine Probe verwendet.
- Führen Sie die Analyse gemäß der Anleitung zur Messung einer Patientenprobe durch.
- Die Zielwerte der Qualitätskontrolle entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel.