

Installationsanleitung für das Software-Update Element DC / Samsung PT10V

Laden Sie die Software auf einen leeren USB-Stick

1. Öffnen Sie URL <http://www.scilvet.de/service/downloads/> im Internetbrowser.
2. Gehen Sie in der Geräteliste zu Element DC (Samsung PT10V).
3. Wählen Sie Software-Update-Vers-2.09.51 zum Herunterladen.
4. Speichern Sie die .zip Datei auf Ihrem PC und entpacken Sie den Ordner.
5. Speichern Sie die entpackten Dateien auf einem leeren USB-Stick.
6. Schalten Sie Ihr Gerät ein.
7. Stecken Sie den USB-Stick in einen USB-Port an der Rückseite des Gerätes.

Update auf dem Gerät installieren:

1. Gehen Sie im Menü auf "Einstellungen".
2. Tippen Sie auf "System".
3. Wählen Sie "Update" aus
4. und als Update-Quelle "USB-Speicher".
5. Das Update wird automatisch installiert.
6. Sobald das Update installiert wurde, können Sie den USB-Stick entfernen.
7. Führen Sie einen "Neustart" Ihres Gerätes durch.
8. **NUR** für die Samsung PT10V Kunden: wiederholen Sie den Installationsvorgang