

# Anleitung

## Qualitätskontrolle am Element RC3X

**Kontrollmaterial:** BIO-RAD Lyphocheck Assayed Chemistry Control Level 2  
(Art.nr.: 107308)

### Vorbereitung:

- Kontrollmaterial BioRad Lyphocheck Control Level 2 aus dem Kühlschrank nehmen
- Kontrollmaterial mit 5 ml Aqua dest. Auflösen und sorgfältig mischen
- mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen

### Durchführung der Qualitätskontrollmessung:

Zur Überprüfung der Geräte- und Reagenzperformance ist die Durchführung von Qualitätskontrollmessungen empfohlen.

- Das jeweilige Qualitätskontrollmaterial wird wie eine Probe verwendet.
- Wählen Sie den jeweiligen Analyseschacht an.
- Drücken Sie das Symbol **Qualitätskontrolle**, um die Messung zu starten.
- Wählen Sie eine Qualitätskontrolle [1, 2, 3, 4] aus.
- Führen Sie die Analyse gemäß der Anleitung zur Messung einer Patientenprobe durch.
- Die Ergebnisse der Qualitätskontrollmessung werden im Ergebnisspeicher gespeichert.
- Die Zielwerte der Qualitätskontrolle entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel.