




Anleitung zur Installation des Softwareupdates

Es wird ein leerer USB-Stick mit mindestens 50MB Speicherplatz benötigt.

- Laden Sie das Software-Update im Download-Bereich der scil Webseite <https://www.scilvet.de/downloads/> runter
- Das Softwarepaket ist in der .zip Datei enthalten.
- Extrahieren Sie die Datei auf den USB-Stick

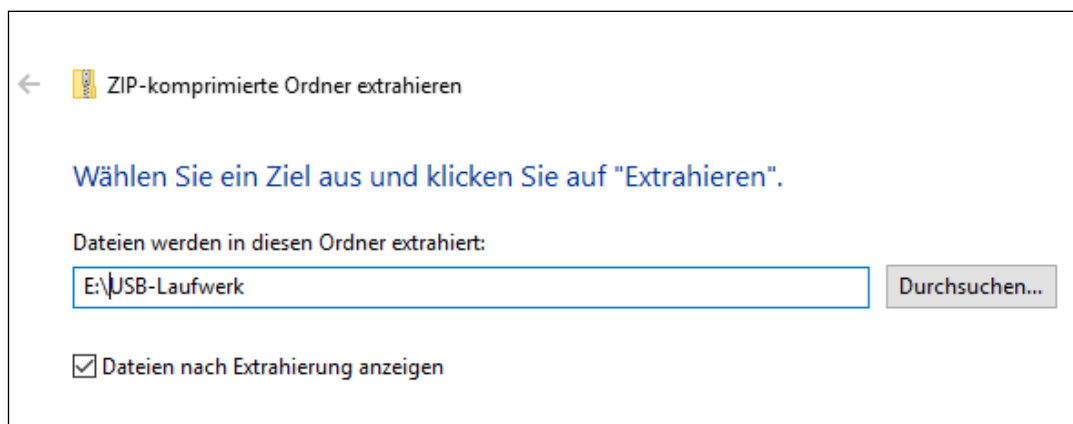

- Stellen Sie sicher, dass sich auf dem USB-Stick folgende Dateien befinden.

 HBP01_VERSION_DONT_CARE
 ScilRCX_20221130_084023_CK12.bin

- Stecken Sie den USB-Stick in einen freien USB-Anschluss auf der Rückseite des Element RCX.
- Schalten Sie den Analyzer an.
- Tippen Sie auf das Menü „Einstellungen – Administrator - Systemaufrüstung“.
- Das Update wird automatisch installiert. Nach Abschluss der Installation startet das Element RCX die Software neu. Bitte warten Sie, bis das Startmenü angezeigt wird und entfernen Sie im Anschluss den USB-Stick.