

EUROlyser Cube-Vet

Ändern der Übertragungseinstellungen nach Update


Nach erfolgreich durchgeführtem Update an Ihrem EUROlyser Cube-Vet Analysegerät ist es vonnöten, die Übertragungseinstellungen wieder auf den ursprünglichen Wert einzustellen, sodass Ihre Ergebnisse störungsfrei an die Praxissoftware übertragen werden können.


Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Warten Sie nach dem Update, bis das Gerät das Hauptmenü anzeigt
2. Gehen Sie in folgender Abfolge der Schaltflächen durch das Menü:

Einstellungen -> Interface -> Host -> Servicepasswort: 3030 -> bestätigen

3. Wählen Sie in der nun dargestellten Auswahl "EMR/LIS" aus
4. Tippen Sie auf "EMR Protokoll" und wählen Sie im nun dargestellten Drop-Down-Menü die Option "TEXT/PLAIN USB" aus
5. Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen so gesetzt sind wie folgendes Bild beschreibt:

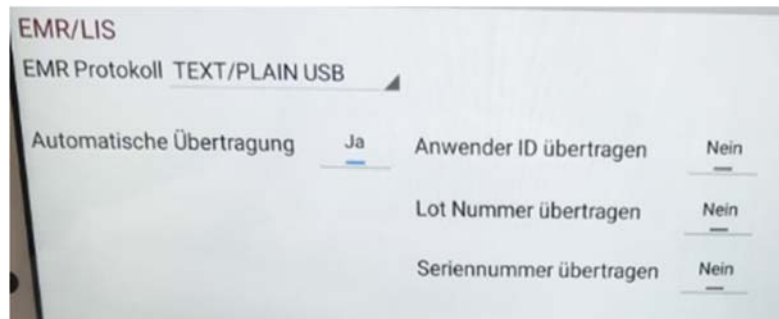

6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit  unten links auf dem Bildschirm
7. Kehren Sie zurück ins Hauptmenü

Falls Sie Fragen haben oder Probleme bei der Durchführung der dargestellten Schritte aufgetreten sein sollten, wenden Sie sich bitte an:

scil animal care company GmbH, Technischer Service
Tel.: 06204 / 7890 221