



Anleitung zur Installation der QuickVet®-Software



1. Öffnen Sie die URL <http://www.scilvet.de/service/quickvet-softwareupdate/> in einem Internetbrowser und speichern die zip.-Datei auf Ihrem PC.

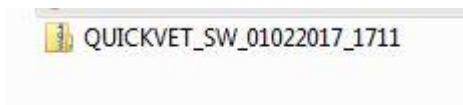


2. Entpacken Sie den heruntergeladenen zip.-Ordner. (rechte Maus Taste → alle extrahieren)

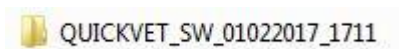

3. Öffnen Sie den Ordner und kopieren Sie alle 7 Dateien auf einen leeren USB-Stick.

CheckDisk	07.03.2017 11:04	Dateiordner
PRINT4	07.03.2017 11:05	Dateiordner
PRINT5	07.03.2017 11:05	Dateiordner
PRINT6	07.03.2017 11:05	Dateiordner
PRINT7	07.03.2017 11:05	Dateiordner
QuickVet	07.03.2017 11:05	Dateiordner
update	07.03.2017 11:05	Dateiordner

4. Überprüfen Sie mit Hilfe der Eigenschaften, ob sich nun 91 Dateien und 15 Ordner auf dem USB-Stick befinden. (alle Dateien markieren → rechte Maustaste → Eigenschaften)

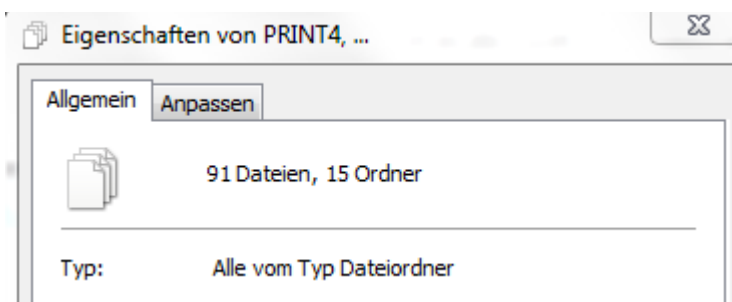

5. Schalten Sie Ihr QuickVet® ein.
6. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port auf der Rückseite des Gerätes ein.
7. Wählen Sie Menü „**Einstellungen**“ aus.

Anleitung zur Installation der QuickVet[®]-Software



8. Wählen Sie Menüpunkt „**Software V.**“ aus.
9. < zum Öffnen des Menüs drücken.
10. **Upgrade** drücken.
11. Hinweis: Upgrade to newer version? **Yes** zur Bestätigung des Upgrades drücken.
12. Das Update startet automatisch.
13. Nach Beendigung des Updates startet das Gerät neu.